

TRAJES ANTI - SHOCK NO NEUMÁTICO (NASG) LIFE WRAP



¿QUÉ ES LA HEMORRAGIA POSPARTO (HPP)?

La HPP se define comúnmente como una pérdida de sangre de 500 ml o más dentro de las 24 horas después del nacimiento, mientras que la HPP grave se define como una pérdida de sangre de 1000 ml o más en el mismo marco de tiempo. Puede seguir a un parto vaginal o a una cesárea. La HPP afecta aproximadamente al 2% de todas las mujeres que dan a luz. Es la causa más común de morbilidad y mortalidad materna en la mayoría de los países de bajos ingresos.

CARACTERÍSTICAS:

- Lavable y reutilizable.
- Vida útil: se puede utilizar hasta 144 veces.
- MATERIALES: Neopreno Nylon.
- Dimensiones aprox.:
 - Ancho Total del Tummy: 120 cm
 - Ancho Total de la cadera: 96,5 cm
 - Longitud Total: 123 cm
- Peso aprox.: 1.5 kg
- 09 Velcros de sujeción.

¡Ayuda a reducir la morbilidad y mortalidad materna en todo el mundo!

¡Este producto de primeros auxilios portátil y asequible, se puede utilizar hasta 144 veces!

FUNCIONES DEL PRODUCTO:

- La NASG es una prenda ligera de neopreno que se compone de cinco segmentos que se cierran con Velcro.
- Cuando se ajusta correctamente, la NASG reutilizable fuerza la sangre a los órganos esenciales: corazón, pulmones y cerebro.
- La NASG aplica presión a la parte inferior del cuerpo y el abdomen, lo que estabiliza los signos vitales hipovolémico.

La OMS ha establecido políticas y programas de acción para incorporar nuevas directrices para el tratamiento de la HPP bajo las cuales se establecen los siguientes puntos con respecto a la NASG:

El uso de NASGs se recomienda como una medida para ganar tiempo hasta que se disponga de la atención adecuada. Revisar las directrices nacionales para garantizar la inclusión de NASGS. Revisar los planes de formación para garantizar que los proveedores estén capacitados para utilizar los NASGS. Para adquirir NASG, Adaptarse a entornos de bajos recursos según sea necesario.

FUNCIONES DEL PRODUCTO:

- Coloque la NASG debajo de la mujer con el borde superior al nivel de su costilla más baja.
- Cierre bien los segmentos 1 alrededor de los tobillos.
- Cierre el segmento 2 firmemente alrededor de cada pantorrilla. Deje la rodilla libre para que la pierna se pueda doblar.
- Cierre firmemente el segmento 3 alrededor de cada muslo. Deje la rodilla libre.
- Cierre el segmento 4 alrededor de la pelvis con el borde inferior a nivel del hueso púbico.
- Cierre el segmento 5 con una bola de presión directamente sobre el ombligo.
- Termine de cerrar la NASG usando el segmento 6.

PRECAUCIÓN

- Los segmentos 1, 2 y 3 pueden ser aplicados por 2 personas simultáneamente.
- Los segmentos 4, 5 y 6 sólo deben ser aplicados por 1 persona.
- Asegúrese de que la mujer pueda respirar normalmente con el segmento 6 en su lugar.

RETIRAR EL NASG

- Retire la NASG sólo cuando la mujer ha estado estable durante 2 horas con:
 - Sangrado menor a 50 ml/hora.
 - Pulso menor a 100 BPM.
 - Presión Arterial menor a 90/60.
- Tome el pulso y la presión arterial.
- Confirme que ambos son estables.
- Simultáneamente retire los segmentos 1 de alrededor de ambos tobillos. Espere durante 15 minutos.
- Tome el pulso y la presión arterial. Si no hay cambio, siga adelante.
- Simultáneamente retire los segmentos 2 de alrededor de ambas pantorrillas Espere 15 minutos.
- Tome el pulso y la presión arterial. Si no Cambiar, seguir adelante.
- Simultáneamente retire los segmentos 3 de alrededor de ambos muslos. Espere 15 minutos.
- Tome el pulso y la presión arterial. Si no Cambio, sigue adelante
- Retire el segmento 4 de alrededor de la pelvis.
- Tome el pulso y la presión arterial. Si no hay cambio, siga adelante.
- Retire los segmentos 5 y 6 de alrededor del abdomen Espere otros 15 minutos antes de permitir que la mujer se siente.

PRECAUCIÓN

Si la BP disminuye en 20mm/Hg o el pulso aumenta en 20bpm después de que se haya eliminado cualquier segmento, reemplazar rápidamente todos los segmentos en cualquier orden y considerar la necesidad de más salina o transfusión de sangre.

PRECAUCIÓN La aplicación y el retirado de la NASG sólo debe ser hecha por personal capacitado.

